



CE

MD

UDI

ORTÉZA ZÁPĚSTÍ POD PRSTY
04/5007489



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

ORTÉZA ZÁPĚSTÍ POD PRSTY

URČENÝ ÚČEL

Ortéza zápěstí pod prsty je určena k fyziologickému znehybnění zápěstí a ruky a to díky tepelně tvarované plastové dlaze. Levé a pravé provedení.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Ortopedická pomůcka je plně otevírací. Slouží k fyziologickému znehybnění zápěstí a ruky a to díky tepelně tvarované dlaze. Správné přiložení a fixaci na končetině zajišťují suché zipy.

INDIKACE

- Těžké distorze a pohmoždění zápěstí a ruky
- Syndrom karpálního tunelu
- Metakarpální chirurgie
- Doléčení zlomenin a luxací zápěstí
- Poranění nervus radialis
- Bolestivé artrózy v oblasti zápěstí, kloubů prstů a/nebo palcového sedlového kloubu

KONTRAINDIKACE

Není známo.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Velur 40% (VL), Polyuretan (PUR) 39%, Polyvinylchlorid (PVC) 19%. Nylon (NY) 2%

LIKVIDACE




Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ


První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

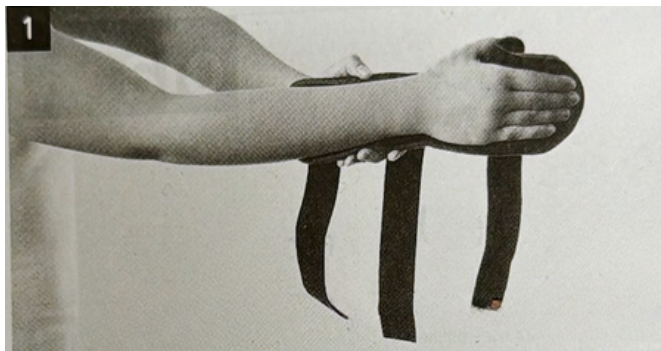

1.

Pro nasazení ortézy otevřete všechny suché zipy a vložte předloktí do dlahy.


Opatrně pohybujte prsty a palcem, dokud není ruka v optimální (správné) poloze.

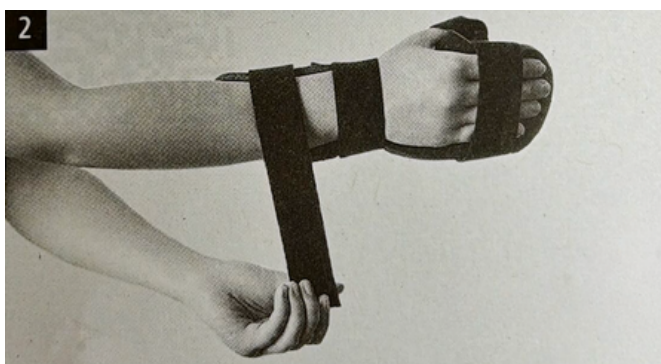

2.

Poté zapněte suchý zip kolem zápěstí, následně pásky kolem prstů a palce a nakonec pásek kolem předloktí.

Ujistěte se, že je výrobek pevně upevněn, ale ne příliš těsně, aby nedocházelo k zaškrcení a přerušování toku krve.

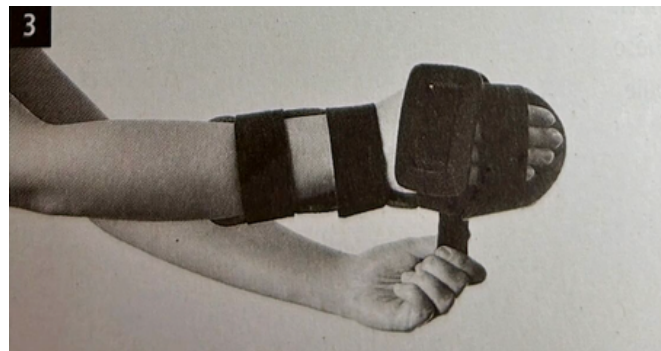

3.

Můžete také připevnit přídatný pásek na hřbet ruky.

Polstrování by mělo zakrývat citlivou zadní část ruky.

Obtočte pásek se suchým zipem kolem ortézy a zapněte jej provlečením očkem (průvlakem), který je součástí, a pevně jej utáhněte.

Pokyny k péči

- Výrobek by měl být vyprán před prvním použitím a poté pravidelně.
- Před praním vyjměte odnímatelné polstrování a suché zipy z dlahy. Ujistěte se, že lepicí (suché) pásky na samotné dlahy nejsou odstraněny.
- Dlahu lze čistit vlhkým hadříkem.
- Textilní části perte ručně při maximální teplotě 30 °C. Použijte jemnou mýdlovou vodu a výrobek dobře opláchněte. Vodu opatrně vymačkejte bez kroucení.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality výrobku nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití neaplikujte mastné ani kyselé krémy, masti nebo tělová mléka — tyto látky mohou materiál poškodit.
- Výrobek skladujte na suchém místě a chraňte jej před sluncem a teplem, ideálně v původním obalu.

HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

