



CE

MD

UDI

KOLENNÍ ORTÉZA POOPERAČNÍ

5007481

PEVNÁ FLEXE 0° / 20°



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

KOLENNÍ ORTÉZA POOPERAČNÍ PEVNÁ FLEXE 0° / 20°

URČENÝ ÚČEL

Kolenní ortéza pooperační pevná flexe 0°/ 20° je určena k imobilizaci kolenního kloubu v plné extenzi při pooperačních a poúrazových stavech kolenního kloubu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Ortopedická pomůcka je plně otevírací. Po dotažení suchých zipů fixuje kolenní kloub v extenzi pomocí anatomicky tvarovaných duralových dlah v těle ortézy.

INDIKACE

- Stavby po operaci kolenního kloubu.
- Distorze kolene.
- Doléčení stavů po distorzi, subluxaci či luxaci pately.
- Pro doléčení po úrazu.
- Fixace dolní končetiny.

KONTRAINDIKACE

Není známo.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utahení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 15%, bavlna 20%, polyester (PES) 5%

LIKVIDACE




Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

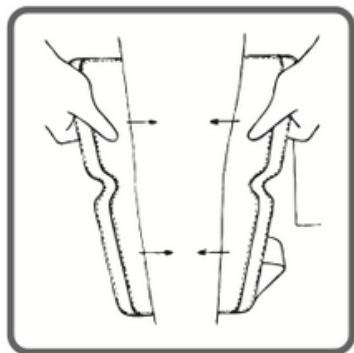


1.

Přiložte pomůcku tak, aby fixační dlahy v zadní části ortézy ležely uprostřed pod kolenem.

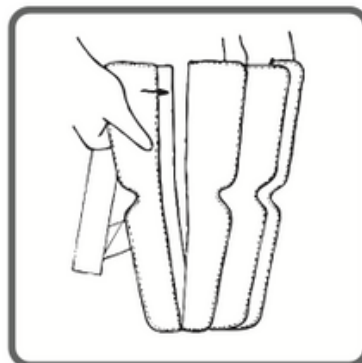

2.

Nastavte boční díly individuálně dle obvodu pacientovy nohy.

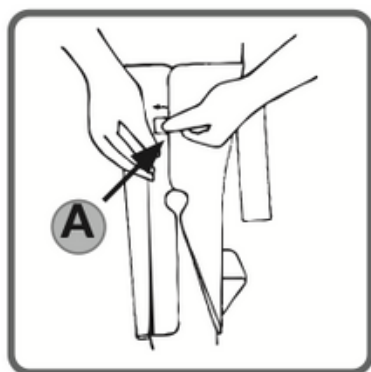

3.

Zapněte postranní díly ortézy (lze použít pomocné suché zipy - viz. ukázka suchý zip A) tak, aby česka byla ve středu otvoru.



4.

Začněte dotahovat pásky v pořadí, jak je znázorněno na obrázku. V případě potřeby dotáhněte volné pásky. Zkontrolujte správnou pozici ortézy a ujistěte se, že pásky nejsou příliš utažené a nebudou snižovat cirkulaci krve.

Před praním vyjměte kovové dlahy a zapněte suché zipy. Ortézu lze prát pouze ručně při 30°. Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.

! TATO POMŮCKA NENÍ URČENA K CHŮZI, ŘÍZENÍ A JINÉMU POHYBU - NOHA MÁ BÝT PO CELOU DOBU REKONVALESCENCE V KLIDOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ORTÉZY VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM NEBUDE NA REKLAMACI POMŮCKY BRÁN ZŘETEL. !

HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

