

CE

MD

UDI



JEDNODUCHÝ RAMENNÍ ZÁVĚS

RESCH II

04/5007518



HAMA  
ORTHES

Zdravotnický prostředek  je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová  
HAMAORTHES  
Husova tř. 1777/131  
370 05 Czech Republic

# Název zdravotnického prostředku

## JEDNODUCHÝ RAMENNÍ ZÁVĚS - RESCH II

### URČENÝ ÚČEL

Jednoduchý ramenní závěs - RESCH II je určen k semirigidní fixaci ramenního pletence a ulnohumerálního kloubu lokte při poúrazových a pooperačních stavech, za účelem omezení pohybu, či k retenci postavení.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Slouží k semirigidní fixaci v oblasti acromioclaviculárního, glenohumerálního a ulnohumerálního kloubu a zajišťuje abdukční a vnitřně rotační postavení v oblasti glenohumerálního kloubu.

### INDIKACE

- Distorze, zhmoždění, reponované a retinované luxace glenohumerálního kloubu
- Distorze a mírné luxace acromioclavi-culárního kloubu
- Doléčení po operacích v oblasti ramene
- Pooperační a poúrazové stavy ruky

### KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména pokud se objeví známky zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok)
- pocit necitlivosti a poruchy prokrvení v oblasti použití
- problémy s lymfatickým odtokem a nevysvětlené otoky

### CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

#### Univerzální oboustranné provedení.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utážení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, Polyamid (PAD) 20%, Bavlna (CO) 15%, polyester (PES) 5%

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

# POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1.

Zapněte pás 1. části ortézy okolo pasu a dotáhněte na velikost vašeho pasu, aby držel pevně na místě (pozor na přílišné utažení). Ramenní popruh přetáhněte přes rameno na přední část těla.

## Pokyny k péči

- Výrobek vyperte před prvním použitím a poté pravidelně.
- Zapněte všechny suché zipy a perte výrobek na šetrný prací program a maximálně při 30 °C. Použijte jemný prací prostředek bez aviváže a dobře opláchněte.
- Vodu opatrně vymačkejte bez kroucení.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte volně uschnout na vzduchu. Nesušte v sušičce, na topení ani na přímém slunci a nikdy jej nežehlete.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití nepoužívejte mastné nebo kyselé krémy či masti — mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.

## NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ



2.

A. Vložte zápěstí do rozepnuté pásky a utáhněte pro fixaci zápěstí v požadovaném úhlu a zavěšení.  
B. Ramenní popruh / (jeho konec se suchým zipem) provlékněte kovovou sponou a utáhněte popruh pro zajištění fixace a zavěšení končetiny v požadovaném úhlu a zavěšení.  
C. Přilepte poslední fixační pásku k té části ortézy, která je upevněna okolo vašeho pasu, otevřete ji a obtočte pásku okolo vaší paže a pásku následně zalepte na suchý zip v požadovaném utážení a fixaci.

# HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:  
pomáháme vám žít bez bolesti.  
“Vaše bolest, naše starost.”



*Martina Škvařil Havelková*  
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

