



**KOLENNÍ ORTÉZA S
KOVOVÝMI KLOUBY
04/5007485**



**HAMA
ORTHES**

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

KOLENNÍ ORTÉZA S KOVOVÝMI KLOUBY

URČENÝ ÚČEL

Kolenní ortéza s kovovými klouby vede kolenní kloub pomocí bočních kloubních výztuh.

Chrání před nadměrným propnutím (hyperextenzí) a lze ji pro snadné nasazení zcela otevřít.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Kolenní ortéza s kovovými klouby je určena ke stabilizaci a částečné imobilizaci kolenního kloubu.

Duralové stabilizační výztuhy a klouby omezují rozsah pohybu kolenního kloubu a podporují tak jeho hojení, například po operaci.

INDIKACE

- Degenerativní změny, jako je artritida a kloubní degenerace (artróza)
- Nestabilita po poranění postranních vazů
- Po operacích přetržených vazů
- Při nestabilitě zkřížených vazů
- Gonartróza

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v následujících případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota, otok)
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy lymfatického odtoku a nevysvětlené otoky

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.



Nepoužívejte aviváž!

Výrobek je stranově univerzální.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Není-li předepsáno jinak, výrobek by měl být během delších klidových období (např. při spánku) sejmut.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Slitina hliníku - DURAL 39%, PU pěna (PUR) 18%, Polyamid (PA) - 10%, Polyester (PES) 10 %, Bavlna (CO) 10%, Pryž 8%, Elastan (EA) 5%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Při správném používání nejsou v současnosti známy žádné nežádoucí účinky.

Pokud je výrobek příliš utažený, může způsobit lokální tlaková místa nebo utlačení cév a nervů.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



Pro nasazení otevřete všechny suché zipy a manžetu zcela rozepněte.

Při nasazování mějte na paměti, že se ortéza směrem dolů zužuje.

Přiložte zadní část ortézy k noze a upevněte suchý zip na stehně.



Uzavřete suchý zip na manžetě v oblasti bérce.

Ortéza je správně umístěna, pokud je česka ve vyhrazeném otvoru.



Nakonec upevněte elastické pásky jejich obtočením kolem nohy a pevně je zajistěte.

Ujistěte se, že ortéza drží pevně, ale není příliš utažená, aby nedocházelo k otlakům.

Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perte pravidelně.
- Vyměňte postranní výztuhy. Výztuhy lze otřít vlhkým hadříkem.
- Před praním uzavřete všechny suché zipy a perete textilní části při maximální teplotě 30 °C.
- Používejte jemný prací prostředek bez aviváže. Důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné nebo kyselé krémy, masti ani pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



Nepoužívejte aviváž!

HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

