



**KOLENNÍ ORTÉZA S
NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE
HAMA 100
04/5007478**



**HAMA
ORTHES**

Zdravotnický prostředek  je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

KOLENNÍ ORTÉZA S NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE HAMA 100

URČENÝ ÚČEL

Kolenní ortéza HAMA 100 fixuje koleno v poloze, kterou lze individuálně nastavit po úrazech nebo operacích.

Pomocí kloubů ROM lze nastavit vhodný rozsah pohybu (Range of Motion) tak, aby byla zajištěna časná mobilizace kolenního kloubu.

Měkké manžety poskytují vysoký komfort při nošení a otevřená konstrukce usnadňuje nasazování a snímání.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mediolaterální stabilizaci v kolenním kloubu s možností individuálního nastavení rozsahu pohybu pomocí kloubu.

INDIKACE

- Po úrazech nebo operacích k imobilizaci kolenního kloubu s následnou mobilizací v definovaných rozsazích pohybu.
- Měkkotkáňová poranění kolenního kloubu.
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích kolene.
- Atróza, Artritida
- Intabilita kolenního kloubu
- Rehabilitace kolenního kloubu po operacích vazivového aparátu

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v následujících případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota, otok)
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy lymfatického odtoku a nevysvětlené otoky

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

Nepoužívejte aviváž!

Výrobek je stranově univerzální.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Není-li předepsáno jinak, výrobek by měl být během delších klidových období (např. při spánku) sejmout.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Nylon (NY) 45%, Hliník (AL) 21%, Ocel 15%, PU pěna (PUR) 8%, Polyester (PES) 6%, Bavlna (CO) 3%, Polyoxymethylen (POM) 2%, Silikon 1%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Při správném používání nejsou v současnosti známy žádné nežádoucí účinky na jakoukoli část těla. Pokud je však výrobek příliš utažený, může způsobit lokální tlaková místa nebo utlačení cév a nervů.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1.

Pro nasazení otevřete všechny suché zipy a textilní manžety.

Při nasazování dbejte na to, že se ortéza směrem dolů zužuje.

Přiložte ortézu k zadní straně nohy tak, aby klouby ROM byly umístěny v linii se středem kolene.



3.

Poté uzavřete pásky se suchým zipem ve stejném pořadí – provlékněte je očkem a pevně utáhněte.

V případě potřeby upravte manžety a suché zipy tak, aby byla ortéza správně usazena.

Ujistěte se, že ortéza drží pevně, ale není příliš utažená, aby nedocházelo k otlakům.



2.

Nejprve uzavřete širokou manžetu na bércei, poté manžetu na stehně.

Následně uzavřete dvě užší manžety.

Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perte pravidelně.
- Vyměňte postranní výztuhy. Výztuhy lze otřít vlhkým hadříkem.
- Před praním uzavřete všechny suché zipy a perte textilní části v pracím sáčku při maximální teplotě 30 °C.
- Používejte jemný prací prostředek bez aviváže. Důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné nebo kyselé krémy, masti ani pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



Nepoužívejte aviváž!

HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.

“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

