

CE

MD

UDI



KRČNÍ LÍMEC S PELOTOU  
04/5007543



HAMA  
ORTHES

Zdravotnický prostředek  je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová  
HAMAORTHES  
Husova tř. 1777/131  
370 05 Czech Republic

# POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



**1.**  
Obtočte límeček kolem krku dle anatomického tvarování.



**2.**  
Zapněte suchý zip.



Zabudovaná termoplastická pelota.

## Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perete pravidelně.
- Před praním uzavřete suchý zip a perete při maximální teplotě 30 °C.
- Používejte jemný prací prostředek bez aviváže. Důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné nebo kyselé krémy, masti ani pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chráňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



**Nepoužívejte aviváž!**

# HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:  
pomáháme vám žít bez bolesti.  
“Vaše bolest, naše starost.”



*Martina Škvařil Havelková*  
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaortheses věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

