



CE

MD

UDI

ORTÉZA KOTNÍKU PEVNÁ
ŠNĚROVACÍ

04/5007565



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

ORTÉZA KOTNÍKU PEVNÁ ŠNĚROVACÍ

URČENÝ ÚČEL

Šněrovací ortéza hlezenního kloubu zajišťuje účinnou stabilizaci horního hlezenního kloubu.

Boční výztuhy zabraňují podvrtnutí, aniž by omezovaly ohyb a natažení chodidla.

Štíhlá konstrukce poskytuje perfektní přizpůsobení a společně s měkkými, prodyšnými materiály zajišťuje vysoký komfort při nošení.

Díky širokému systému velikostí je ortéza vhodná i pro menší obvod nártu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Šněrovací ortéza hlezenního kloubu je určena ke stabilizaci hlezenního kloubu.

Boční stabilizační prvky omezují rozsah pohybu hlezenního kloubu a napomáhají tak jeho hojení, například po úrazu.

INDIKACE

- Chronická nestabilita hlezenního kloubu
- Poranění hlezenního kloubu a vazů, např. pohmoždění, podvrtnutí, natržení kloubního pouzdra
- Stabilizace po sešití vazů

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v následujících případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu, jako je zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy odtoku lymfy a nevysvětlené otoky

Nepoužívejte aviváž!

Výrobek je stranově univerzální.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Není-li předepsáno jinak, výrobek by měl být během delších klidových období (např. při spánku) sejmut.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Polypropylen (PP) 50%, Polyester (PES) 30%, PU pěna (PUR) 15%, Nylon (NY) 5%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Při správném používání nejsou v současnosti známy žádné nežádoucí účinky na jakoukoli část těla. Pokud je však výrobek příliš utažený, může způsobit lokální tlaková místa nebo utlačení cév a nervů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1.

Vsuňte nohu do ortézy a umístěte patu do připraveného výřezu.



2.

Srovnejte jazyk tak, aby ležel rovně, a utáhněte předem připravené šněrování tak, aby bylo pohodlné.



3.

Horní část ortézy lze rychle a snadno zašněrovat křížením tkaniček kolem háčků (spon). Nakonec tkaničky zajistěte uvázáním uzlu.

Ujistěte se, že ortéza drží pevně, ale není příliš utažená, aby nedocházelo k otlakům.

Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perte pravidelně.
- Perte odděleně v pracím sáčku při maximální teplotě 30 °C. Používejte jemný prací prostředek bez aviváže (např. speciální prací prostředek pro jemné prádlo) a důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné nebo kyselé krémy, masti ani pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



Nepoužívejte aviváž!

HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

