



CE

MD

UDI

ORTÉZA ZÁPĚSTÍ
PRODLOUŽENÁ
04/5007494



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

ORTÉZA ZÁPĚSTÍ PRODLOUŽENÁ

URČENÝ ÚČEL

Ortéza zápěstí prodloužená je určena k fixaci zápěstí a předloktí ve středním postavení při pooperačních a pourazových stavech či onemocněních v oblasti zápěstí a předloktí.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udrhuje semirigidní fixaci v oblasti distálního předloktí a karpu za pomoci rigidní tvarovatelné dlahy a 2 termoplastických výztuh.

INDIKACE

- Stavy po distenzích a luxacích
- Distorze a instabilita v oblasti zápěstí
- Doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména pokud se objeví známky zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok)
- pocit necitlivosti a poruchy prokrvení v oblasti použití
- problémy s lymfatickým odtokem a nevysvětlené otoky

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

Vyrábí se v pravém a levém provedení.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utážení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Polyester 90% (PES), Polyamid (PA) 5%.
Hliník (AL) 5%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

LIKVIDACE




Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

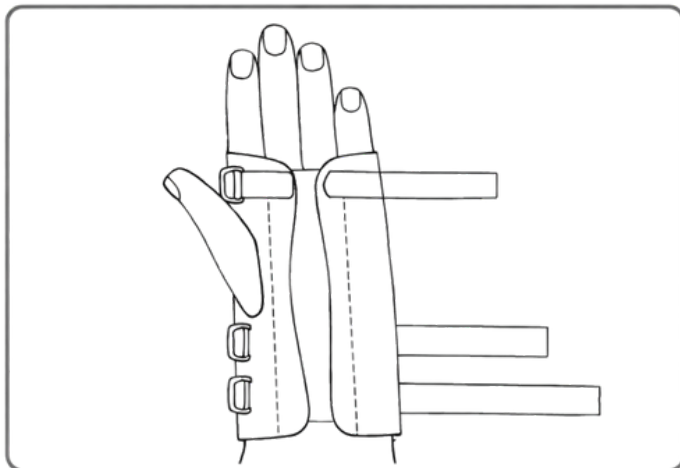

1.

Rozepněte všechny pásky. Duralová dlahu může být tvarována dle potřeby odborným personálem. Vsuňte indikovanou ruku do ortézy.

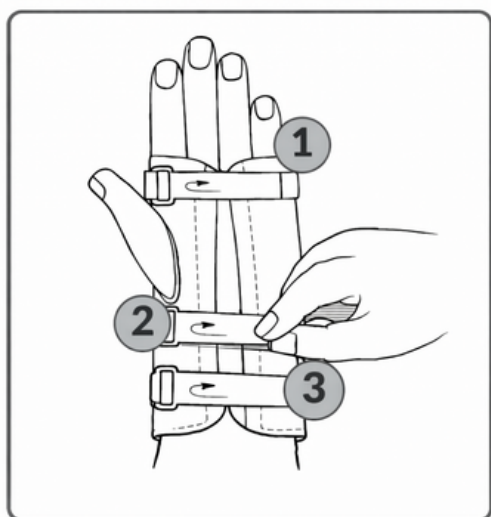

2.

Zapněte pásky dle pořadí na obr. 2. a regulujte dotažení.

Pokyny k péči

- Výrobek vyperte před prvním použitím a poté pravidelně.
- Před praním vyjměte vloženou duralovou dlahu.
- Zapněte všechny suché zipy a perte výrobek na šetrný prací program a na maximálně 30 °C. Použijte jemný prací prostředek bez aviváže a dobře opláchněte.
- Vodu opatrně vymačkejte bez kroucení.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte volně uschnout na vzduchu. Nesušte v sušičce, na topení ani na přímém slunci a nikdy jej nežehlete.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití nepoužívejte mastné nebo kyselé krémy či masti — mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.

NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ



HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

