

CE

MD

UDI

RAMENNÍ ZÁVĚS S DISTANČNÍ
PODLOŽKOU

04/5007523



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

RAMENNÍ ZÁVĚS S DISTANČNÍ PODLOŽKOU

URČENÝ ÚČEL

Ramenní závěs s distanční podložkou je určen k imobilizaci ramenního kloubu ve 20° abdukci s možností nastavení míry rotace v glenohumerálním kloubu při pouřazových a pooperačních stavech.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Mírně imobilizuje ramenní kloub ve 20° abdukci pomocí vloženého pažního klínu.

INDIKACE

- Pooperační stavy vyžadující imobilizaci ramenního kloubu v abdukci
- Poranění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, rotátorová manžeta, vazová poranění)
- Doléčení po reponované luxaci glenohumerálního kloubu
- Natržení svalů pletence ramenního
- Akutní fáze impingementu
- Léčba zlomenin v oblasti proxim humeru

KONTRAIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména pokud se objeví známky zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok)
- pocit necitlivosti a poruchy prokrvení v oblasti použití
- problémy s lymfatickým odtokem a nevysvětlené otoky

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

Pravé a levé provedení.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utážení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 40%, Bavlna (CO) 20%, Polyamid (PAD) 20%, Polyester (PES) 20%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

1.



Zapněte pás 1. části ortézy okolo pasu a dotáhněte na velikost vašeho pasu, aby držel pevně na místě (pozor na přílišné utažení). Ramenní popruh přetáhněte přes rameno na přední část těla.

2.



Přilepte abdukční podložku na přední část ortézy, která je umístěna v oblasti vašeho pasu.

3.



Rozepněte loketní ortézu a vložte do ní indikovanou končetinu. Veškeré suché zipy dotáhněte pro optimální fixaci pomůcky na končetině. Zapněte ramenní popruh v plastové sponě a upravte délku popruhu pro přizpůsobení nastavenému rozsahu pohybu pro podporu zavěšení končetiny v daném stupni a úhlu.

Pokyny k péči

- Výrobek vyperte před prvním použitím a poté pravidelně.
- Před praním vyjměte kovové klouby.
- Zapněte všechny suché zipy a perte výrobek na šetrný prací program a maximálně při 30 °C. Použijte jemný prací prostředek bez aviváže a dobře opláchněte.
- Vodu opatrně vymačkejte bez kroucení.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte volně uschnout na vzduchu. Nesušte v sušičce, na topení ani na přímém slunci a nikdy jej nežehlete.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití nepoužívejte mastné nebo kyselé krémy či masti — mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.

NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ



HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

