


CE

MD

UDI

SUSPENZOR

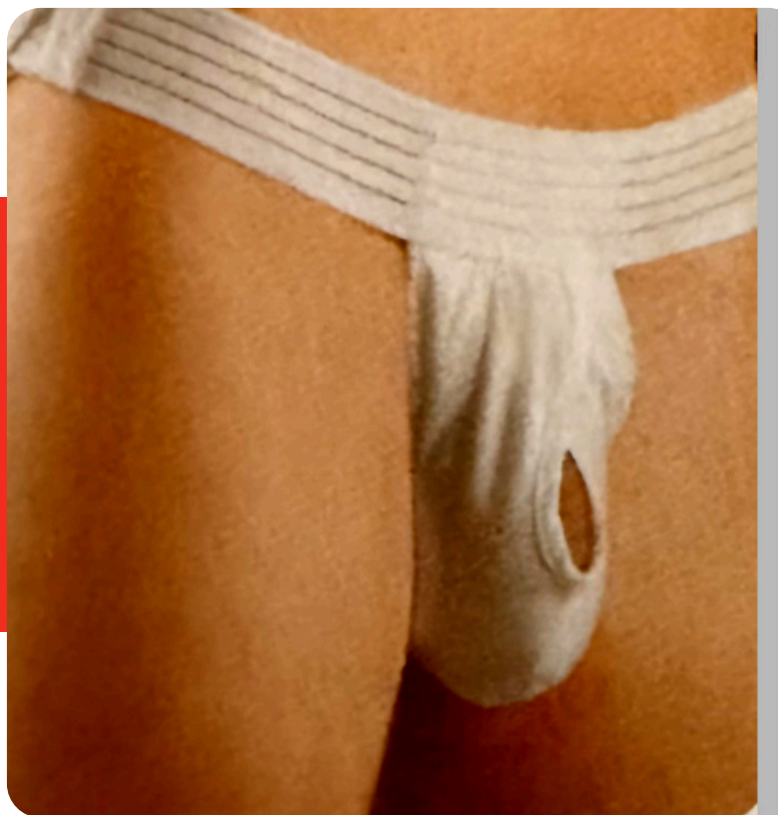

HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

SUSPENZOR

URČENÝ ÚČEL

Suspensor je zdravotnická pomůcka určená k podpoře a stabilizaci šourku při zdravotních obtížích v oblasti varlat a nadvarlat. Anatomicky tvarovaný váček nadlehčuje šourek, omezuje jeho nadměrný pohyb a pomáhá snižovat bolest a nepříjemné tahové zatížení tkání.

Pomůcka je vhodná při zánětlivých, poúrazových a pooperačních stavech, při kýlách v oblasti třísel a šourku nebo při onemocněních varlat a nadvarlat, kdy je žádoucí stabilizace a ochrana citlivé oblasti.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Anatomicky tvarovaný váček nadlehčuje šourek a omezuje jeho bolestivý pohyb. Stabilizační efekt pomáhá snižovat tahové zatížení varlat a nadvarlat. Elastický pás zajišťuje bezpečné a pohodlné přizpůsobení.

INDIKACE

- Záněty varlat (orchitida)
- Záněty nadvarlat (epididymitida)
- Poúrazové stavy v oblasti šourku
- Pooperační stavy po operacích varlat, nadvarlat nebo třísel
- Tříselná nebo skrotální kýla
- Hydrokéla (vodní kýla varlete)
- Nádorová onemocnění varlat a nadvarlat
- Bolestivé stavy šourku při fyzické aktivitě

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména pokud se objeví známky zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok)
- pocit necitlivosti a poruchy prokrvení v oblasti použití
- problémy s lymfatickým odtokem a nevysvětlené otoky

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácí svou funkci.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Bavlna (CO) 60%, Elastan (EA) 25%
Polyamid (PAD) 10%, Polyester (PES) 5%,

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1.

Přiložte suspenzor tak, aby byl váček umístěn pod šourkem a poskytoval oporu varlatům. Elastický pás ved'te kolem boků a pomůcku přizpůsobte tak, aby byla pohodlně usazena na těle. Upravte polohu suspenzoru tak, aby váček nadlehčoval šourek a omezoval jeho nadměrný pohyb. Pomůcka by měla být pevně přiložena k tělu, ale nesmí způsobovat nepříjemný tlak nebo bolest. Po nasazení zkontrolujte, že je suspenzor správně usazen a poskytuje dostatečnou oporu při pohybu.

Pokyny k péči

- Výrobek vyperte před prvním použitím a poté pravidelně.
- Zapněte všechny suché zipy a perte výrobek na šetrný prací program a maximálně při 30 °C. Použijte jemný prací prostředek bez aviváže a dobře opláchněte.
- Vodu opatrně vymačkejte bez kroucení.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte volně uschnout na vzduchu. Nesušte v sušičce, na topení ani na přímém slunci a nikdy jej nežehlete.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití nepoužívejte mastné nebo kyselé krémy či masti — mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.

NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ



HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem.

Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

