



CE

MD

UDI

AIR WALKER HAMA 300
RIGIDNÍ

04/5007572



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

AIR WALKER HAMA 300 RIGIDNÍ

URČENÝ ÚČEL

Air Walker HAMA 300 zajišťuje optimální znehybnění chodidla a bérce po úrazech nebo operacích.

Pro přesné a individuální přizpůsobení oblasti kotníku jsou integrovány nastavitelné vzduchové komory.

Protiskluzový profil a zaoblená podrážka umožňují bezpečnou a pohodlnou chůzi – Air Walker HAMA 300 je tak ideální náhradou za sádrovou fixaci při chůzi.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Výrobek je určen k znehybnění hlezenního kloubu a chodidla. Pevná plastová skořepina omezuje rozsah pohybu hlezenního kloubu a chodidla.

INDIKACE

- Těžká podvrtnutí kotníku
- Stabilní zlomeniny chodidla nebo kotníku
- Znehybnění před a po operacích
- Ruptura Achillovy šlachy
- Terapií rezistentní zánět Achillovy šlachy

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu, jako je zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy odtoku lymfy a nevysvětlené otoky

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.



Nepoužívejte aviváž!

Výrobek je stranově univerzální.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Není-li předepsáno jinak, výrobek by měl být během delších klidových období (např. při spánku) sejmut.
- Velikost je uvedena na balení.
- Výrobek mohou používat pouze osoby s hmotností do 125 kg.

MATERIÁL

Stélka - Polyuretan (PUR) 76%, Polyester (PES) 13%, Polyamid (PA) 11%,

Walker - Polypropylen (PP) 85%, Skelné vlákno (GF) - 15%

Klíny - 100% EVA

Vduchové polštáře - Polyuretan (PUR) 100%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1.

Nasazujte Walker vsedě. V případě potřeby si navlékněte přiloženou punčochu. Otevřete všechny suché zipy a textilní manžetu. Vložte nohu do manžety tak, aby pata byla opřená o zadní část Walkeru.



2.

Nejprve zapněte suchý zip přes nárt, poté uzavřete špičkovou část. Následně uzavřete manžetu na holeni. Přední plastovou výztuhu připevněte k manžetě pomocí suchého zipu.



3.

Zapínejte pásky se suchým zipem odspodu nahoru, protáhněte je oky a pevně upevněte. Výrobek musí být pevně usazen, ale ne příliš utážený, aby nedocházelo k otlakům. Walker musí být pohodlný.



4.

Nakonec nastavte tlak ve vzduchových polštářích. Vložte pumpičku s označením „In“ do modrého ventilu a nafoukněte polštáře na požadovanou úroveň. Nepřepřlňujte je. Před sejmutím Walkeru vypusťte vzduch vložení černého konce pumpičky („Out“) do ventilu. Usnadní to sundání a zabrání přetlakování polštářů.

Pokyny k péči

- Textilní části perte ručně při maximální teplotě 30 °C. Používejte jemný prací prostředek bez aviváže a výrobek důkladně vymáchejte. Vodu opatrně vymačkejte, výrobek neždímejte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality výrobku nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž. Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné ani kyselé krémy, masti či pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Výrobek skladujte na suchém místě a chraňte jej před slunečním zářením a teplem, ideálně v původním obalu.

Některé klinické stavy vyžadují stabilizaci nohy v poloze se špičkou směrem dolů (plantární flexe). Pro vysokou verzi Walkeru lze objednat sadu klínek. Klínky se vkládají do manžety Walkeru. Sadu individuálně nastaví odborný personál. Sada obsahuje pět klínek spojených lepicími body.

- Velikost S: použijte klínky 1 až 3
- Velikost M: klínky 2 až 4
- Velikost L a XL: klínky 3 až 5

Tři klínky na sobě odpovídají přibližně 28° plantární flexe.

HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

