

CE

MD

UDI

KOLENNÍ PLETENÁ BANDDÁŽ
POSTRANNÍMI VÝZTUHAMÍ

04/5007470



HAMA
ORTHES

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

Název zdravotnického prostředku

KOLENNÍ PLETENÁ BANDÁŽ S POSTRANNÍMI VÝZTUHAMÍ

URČENÝ ÚČEL

Výrobek slouží ke kompresi kolenního kloubu. Kompresní účinek a integrované boční výztužné prvky stabilizují kolenní kloub. Silikonová vložka obepínající česku podporuje snížení otoku.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mírnou stabilizací v kolenním kloubu bez omezení rozsahu pohybu ve všech směrech. Zahřívá - termoterapie.

INDIKACE

- Podvrtnutí
- Pohmoždění (kontuze)
- Poškození menisku
- Degenerativní změny, jako je artritida a kloubní degenerace (artróza)
- Po operacích kolene
- Chondromalacie pately
- Patelární tendinitida (tzv. skokanské koleno)

KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v těchto případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu, jako je zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy odtoku lymfy a nevysvětlené otoky

⚠ Tento výrobek obsahuje latex, který může způsobit alergické reakce.



Nepoužívejte aviváž!

Výrobek je stranově univerzální.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě přecitlivělosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Není-li předepsáno jinak, výrobek by měl být během delších klidových období (např. při spánku) sejmut.
- Velikost je uvedena na balení.

MATERIÁL

Polyamid (PA) 45%, Termoplastická guma (TPR) 22%, Ocel 20%, Pryž 10%, Elastan (EA) 2%, Polyester (PES) 1%

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.

LIKVIDACE



Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



Správné usazení kolenní bandáže je nezbytné, aby mohla plně rozvinout svůj účinek.

Při nasazování dbejte na to, že se bandáž směrem dolů zužuje.

Proto ji navlékněte širším koncem a se silikonovým kroužkem směřujícím dopředu přes nohu.

Bandáž je správně nasazena tehdy, když silikonový kroužek obepíná česku.



Nepoužívejte aviváž!

⚠ Tento výrobek obsahuje latex, který může způsobit alergické reakce.

Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perte pravidelně.
- Perete odděleně v pracím sáčku při maximální teplotě 30 °C. Používejte jemný prací prostředek bez aviváže (např. speciální prací prostředek pro jemné prádlo) a důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na kůži v místě použití nepoužívejte mastné nebo kyselé krémy či masti — mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



Martina Škvařil Havelcová
HAMAORTHES
Husova tř. 1777/131
370 05 Czech Republic

HAMAORTHES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:
pomáháme vám žít bez bolesti.
“Vaše bolest, naše starost.”



Martina Škvařil Havelková
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem. Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

