



**KRČNÍ LÍMEC S PELOTOU**  
**04/5007543**



**HAMA**  
**ORTHES**

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta. Skladujte na suchém místě, chráněným před přímým slunečním zářením.



Martina Škvařil Havelcová  
HAMAORTHES  
Husova tř. 1777/131  
370 05 Czech Republic

# Název zdravotnického prostředku

## KRČNÍ LÍMEC

### URČENÝ ÚČEL

Krční límec je určen k fixaci krční a šíjové oblasti při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti krku a šíje. Díky zabudované termoplastické pelotě tento krční límec vykazuje vyšší pevnost a fixaci.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udrží semirigidní fixaci v oblasti krku a šíje.

### INDIKACE

- Pooperační fixace
- Posttraumatické stavy
- Pro doléčení fraktur
- Po operaci torticollis
- Po operaci meziobratlových plotének
- Bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)

### KONTRAINDIKACE

Před použitím výrobku se poraďte s lékařem v následujících případech:

- Kožní onemocnění nebo poranění v oblasti použití, zejména při známkách zánětu (zarudnutí, zvýšená teplota, otok)
- Poruchy citlivosti a prokrvení v oblasti použití
- Poruchy lymfatického odtoku a nevysvětlené otoky

### CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělá populace s uvedenou indikací.



**Nepoužívejte aviváž!**

**Výrobek je stranově univerzální.**

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č.65. nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Výrobek je nesterilní a nesmí být použit přímo na poraněnou nebo zdravotními změnami porušenou pokožku. V případě precitlivlosti a alergií, není vhodné používat na holé tělo.
- První nasazení pomůcky by mělo být za asistence odborníka.
- Před každým použitím zkontrolujte správné usazení a funkčnost výrobku a také jeho poškození (např. praskliny, trhliny nebo deformace). Poškozený výrobek se nesmí dále používat.
- Na výrobku neprovádějte vlastní úpravy.
- Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty, chemikáliemi a nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám.
- Výrobek smí být používán pouze pro indikace uvedené v sousedním sloupci.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### MATERIÁL

Polyuretanová (PUR) pěna 70%, Bavlněný úplet 20%, Polyethylen (PE) 10%

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Při správném používání nejsou v současnosti známy žádné nežádoucí účinky.

Pokud je výrobek příliš utažený, může způsobit lokální tlaková místa a utlačení cév a nervů.



### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

Datum poslední revize: 1.2.2020

# POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



**1.**  
Obtočte límec kolem krku dle anatomického tvarování.



**2.**  
Zapněte suchý zip.



Zabudovaná termoplastická pelota.

## Pokyny k péči

- Výrobek před prvním použitím vyperte a následně perte pravidelně.
- Před praním uzavřete suchý zip a perte při maximální teplotě 30 °C.
- Používejte jemný prací prostředek bez aviváže. Důkladně opláchněte.
- Vytvarujte výrobek do správného tvaru a nechte jej volně uschnout na vzduchu.
- Pro zachování kvality nepoužívejte chemické čisticí prostředky, bělidla, benzín ani aviváž.
- Na pokožku v oblasti použití neaplikujte mastné nebo kyselé krémy, masti ani pleťové vody. Tyto látky mohou poškodit materiál.
- Skladujte v suchu, chraňte před teplem a sluncem, ideálně v původním obalu.



**Nepoužívejte aviváž!**

# HAMAORTHESES

Česká rodinná firma s více než 15letou zkušeností ve výrobě a distribuci ortopedických pomůcek.

S láskou k naší profesi a osobním přístupem děláme to, co dává smysl:  
pomáháme vám žít bez bolesti.  
“Vaše bolest, naše starost.”



*Martina Škvařil Havelcová*  
Majitelka a jednatelka firmy

V Hamaorthes věříme, že kvalita začíná u nás samých.

Každá ortopedická pomůcka, kterou vyrobíme, nám projde pod rukama – od pečlivého zpracování až po finální výstupní kontrolu.

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a inovací podle nejnovějších trendů v ortopedii. Používáme pečlivě vybrané materiály, které zajišťují maximální komfort, vysokou kvalitu a spolehlivost, jež je pro nás standardem.

Naše ortézy a bandáže vyrábíme a distribuujeme ze srdce jižních Čech - Českých Budějovic, odkud pomáhají lidem po celé České republice i v zemích Evropské unie.

